

# Curamax<sup>®</sup>

## SPRAY

SPRAY EN POLVO CON PLATA IÓNICA

PARA HERIDAS Y LESIONES EXUDATIVAS

125mL



Cuidarte es  
lo nuestro

INDICACIONES: Polvo mineral a base de silicatos con cualidades absorbentes y que contiene plata iónica al 2,5%. Su uso sobre heridas, abrasiones, quemaduras leves, lesiones de la piel, llagas de decúbito etc. ayuda al control de la exudación creando una zona limpia que facilita el proceso natural de curación protegiendo la zona de la proliferación de bacterias. El producto se adhiere a la zona tratada y se puede eliminar fácilmente usando una solución fisiológica. Si es necesario, fijar el producto a la herida con una gasa estéril o con un vendaje transpirable. No contiene ningún componente que derive de tejidos animales (colágeno, queratina, elastina).

MODO DE EMPLEO: Las heridas deben haberse limpiado previamente con solución isotónica. Agitar bien antes de su uso y, manteniendo la botella en posición vertical, presionar ligeramente la válvula de dispensación, asegurándose que el spray esté dirigido hacia la zona a tratar: no dispensar inútilmente en el aire, evitar posibles riesgos de inflamación. Vaporizar a intervalos cortos evitando dispendios prolongados. Repetir el procedimiento, si es necesario, dos veces al día. USO EXTERNO.

No se conocen reacciones adversas a los componentes del producto.

No lo use por dos semanas más consecutivas, si la lesión no mejora después de este tiempo póngase en contacto con un médico.

Contiene: zeolita micronizada, plata iónica, n-butano.

**Contenido neto: 125mL.**

ADVERTENCIAS: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Mantener fuera del alcance de los niños. No pulverizar sobre una llama abierta y otra fuente de ignición.

Importado por **EFA** Laboratorios

Estero Bellaco 2782 - Montevideo


Número registro 87387

Director Técnico: Q.F. Verónica Brovia

Contacto 2487 2450

atencionalcliente@efa.com.uy

www.efalaboratorios.com.uy

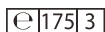

PELIGRO



SIGNORINI MEDICALE S.R.L.  
via dell'artigianato, 14  
Albaredo d'Adige (VR) - ITALY



09/18/ES rev.09



7 730482 001815