

Esogel®

Sachets monodosis

DISPOSITIVO MÉDICO PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Vía oral

1. Indicaciones:

ESOGEL® es un dispositivo médico de acción mecánica que permite reducir rápidamente los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico como: pirosis, dolor epigástrico, regurgitación ácida, tos irritante, disfonía. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (comúnmente abreviada como ERGE) se caracteriza por síntomas (pirosis, regurgitación ácida, tos irritante, disfonía) que pueden o no estar asociados con lesiones inflamatorias erosivas de la mucosa esofágica. La ERGE suele agravarse al acostarse, por lo que los síntomas pueden empeorar durante la noche.

ESOGEL® es un complejo de ácido hialurónico y sulfato de condroitina, que promueve la protección de la mucosa gastroesofágica. La presencia de un componente altamente bioadhesivo (poloxámero 407) en la formulación de **ESOGEL®**, permite al ácido hialurónico y al sulfato de condroitina permanecer en la superficie de la pared esofágica, contribuyendo así al efecto protector frente a la acción del ácido clorhídrico producido por el estómago. Gracias a esta protección, la mucosa se encuentra en las mejores condiciones para implementar los procesos fisiológicos regenerativos.

2. Presentación:

Cada estuche de **ESOGEL®** contiene 20 sachets monodosis de 10mL cada uno.

3. Posología y forma de uso:

Una dosis única (un sachet de 10mL) después de las comidas y antes de acostarse o según la recomendación de su médico.

4. Contraindicaciones:

No existen contraindicaciones específica, excepto en los casos de hipersensibilidad a alguno de los componentes. En estos casos, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Aunque no se conocen efectos adversos, es aconsejable no utilizar el producto durante el embarazo o durante los primeros meses de la lactancia. En cualquier caso, es recomendable que consulte a su médico antes del uso. No se conocen interacciones con otros productos orales.

5. Advertencias:


No exceda la dosis recomendada. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No use el producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños. No administrar el producto a niños menores de 12 años.

6. Conservación:

Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y lejos de fuentes de calor. No congelar.

7. Composición:

Ácido hialurónico, sulfato de condroitina, poloxámero 407, polivinilpirrolidona, xilitol, benzoato de sodico, sorbato de potasio, aromatizante y agua purificada.

 Biofarma
Via Castelliere, 2 – 33036
Mereto di Tomba (UD),
Italia.

Importa y distribuye:



Laboratorios
Anifa, Moll & Cia. S.A.

Estero Bellaco 2782
Montevideo - Uruguay

Contacto: 24872450,

atencionalcliente@efa.com.uy - www.efalaboratorios.com.uy

CE 0477